


QUICK GUIDE SHARPS TERMINATOR®


QUICK GUIDE ST V1.P1

1 QUICK START GUIDE FRONT


BURNING NEEDLES

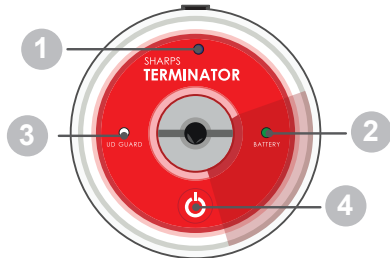


1. ปุ่มไฟน้ำเงิน แสดงความพร้อมในการทำงาน
2. ปุ่มไฟสีแดง/เหลือง/เขียว แสดงความพร้อมของแบตเตอรี่
3. ปุ่มไฟสีขาว แสดงความพร้อมของหลอดยูวี
4. ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง

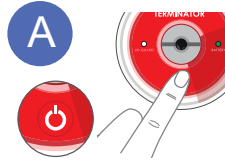

กดปุ่มเปิดเครื่อง เครื่องจะตรวจสอบระบบการทำงานของตัวเองโดยแสดงสัญญาณไฟดังนี้

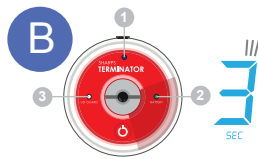

สัญญาณไฟ LED ทั้ง 3 จุดจะติด (1,2,3) ขึ้นพร้อมกันประมาณ 3 วินาที หลังจากนั้นจะดับลง

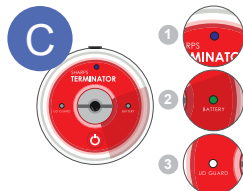

เครื่องจะตรวจสอบระบบที่ละเอียด เริ่มจากไฟน้ำเงิน (1), สีขาว (3) และสีเขียว (2) ตามลำดับ เมื่อตรวจสอบระบบสมบูรณ์แล้ว ไฟสีน้ำเงิน (1) จะติด แสดงความพร้อมในการทำงาน

2 การใส่เข็มฉีดยา



ใส่เข็มฉีดยาลงในเครื่อง ตรงกลางหมุนไปมา เล็กน้อย




ไม่ควรใช้แรงกดมากเกินไป จนทำให้เข็มโค้งงอ ให้กดเข็มลงไปในจังหวะที่พอดีที่จะเกิดการเผาไหม้



3 การตัดหัวเข็มของเครื่อง

ถ้ามีการตัดเข็มผิดพลาด หรือไม่หมด ภายใน 7 วินาที และเครื่องได้เสร็จสิ้นการทำงาน

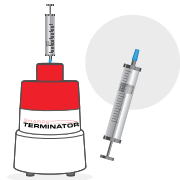

ให้ใส่เข็มฉีดยาค้างไว้ในเครื่อง จนกว่าเครื่องจะตัดเข็มจนขาด และหยุดการทำงาน



นำหลอดและเข็มที่ถูกทำลายทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อหรือถังขยะรีไซเคิล

4 ลักษณะของเข็มที่ถูกทำลาย



ลักษณะของเข็มที่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ ทั้งลงในถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะรีไซเคิล



ลักษณะของเข็มที่ถูกทำลายไม่สมบูรณ์ และไม่สามาถใส่ลงในเครื่องได้ ให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ



ลักษณะของเข็มที่ถูกทำลายไม่สมบูรณ์ และมีส่วนของเข็มคงเหลือมากกว่า 1.6 มม. ให้ใส่ลงในเครื่อง เพื่อทำลายอีกครั้งก่อนที่จะทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ หรือถังขยะรีไซเคิล

QUICK GUIDE SHARPS TERMINATOR®

QUICK GUIDE ST V1.P2

2 QUICK START GUIDE BACK

ภาชนะรองรับหัวเข็ม ที่ถูกทำลายแล้ว



สามารถถือเครื่องได้เพียงมือเดียว และมืออีกข้างสามารถถอด
ที่รองรับออกได้ง่ายด้วยมืออีกข้าง ด้วยการหมุน 1/8 รอบ
ตามเข็มนาฬิกา

B



นำภาชนะที่รองรับหัวเข็มออก และตรวจสอบสภาพเข็มที่ถูก
ทำลาย ถ้าถูกเผาไหม้สมบูรณ์แล้ว ให้ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ
ถ้ามีบางส่วนเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ให้ทิ้งในถังขยะสำหรับของมีคม

C



ประกอบภาชนะที่รองรับกลับเข้า
เครื่องโดยการหมุน 1/8 รอบ
ตามเข็มนาฬิกา



ห้าม !!!

ห้ามคว่ำเครื่อง เด็ดขาด เพราะอาจทำ
ให้เศษผงเข้าไปติดในเครื่อง หรือสัมผัส
กับผู้ใช้งานได้



หัวเข็มที่ยังเหลืออยู่บางส่วนอาจมีความร้อน
ไม่ควรสัมผัสซากที่เหลือโดยตรง

สัญญาณไฟ LED

แสดงการทำงานและความหมาย

-  ไฟ LED **น้ำเงิน**
แสดงการทำงานและความหมาย
-  ไฟ LED **สีเขียว**
แสดงว่าแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน
-  ไฟ LED **สีเหลือง**
แสดงว่าแบตเตอรี่ต้องการชาร์จ
หรือกำลังชาร์จอยู่
-  ไฟ LED **สีขาว**
แสดงว่า หลอด UV กำลังทำงาน
อยู่ในรอบการทำงาน

สัญญาณไฟ LED

กระพริบ แสดงการเตือน / ต้องแก้ไข

-  ไฟ LED สีน้ำเงินกระพริบ แสดงว่า ภาชนะ
ที่รองรับเข็มที่ถูกทำลายเต็มต้องนำไปทิ้ง
ก่อนใช้งาน
-  ไฟ LED สีแดงกระพริบ แสดงว่า แบตเตอรี่
หมด ต้องทำการชาร์จใหม่
-  ไฟ LED คู่กัน แสดงว่า ระบบมอเตอร์ตัด
การทำงาน
-  ไฟ LED คู่กัน แสดงว่า หัวอิเล็กทรอนิกส์ บล็อก
ไม่ทำงาน
-  ไฟ LED คู่กัน แสดงว่า ระบบกำลังป้องกัน
กระแสไฟฟ้าเกิน
-  ไฟ LED แสดงต่อเนื่อง แสดงว่าการชาร์จ
แบตเตอรี่ผิดปกติ ให้ตรวจสอบการเสียบสาย
ไฟเข้าเครื่องหรือเต้าเสียบ

สำหรับคู่มือนี้ เป็นคู่มือการใช้งานฉบับย่อ ผู้ใช้งานควรอ่านและทำความเข้าใจคู่มือการใช้
เครื่องฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้การทำงานได้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด